

travelTim

Vibrations-Reisewecker
Vibration travel alarm clock
Réveil de voyage
avec vibreur
Vibrerende reiswekker
Sveglia da viaggio con
vibrazione

Despertador de viaje
con vibración
Vibrations-rese-
väckarklocka
Vibrerende vekkerklokke
Matkahaerätyskello
värinäkuulokkeilla

Budzik podróźny z
funkcją wibracji
Rezgő üzemmódú úti
ébresztőóra



CE
Designed
in Europe



Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van uw »travelTim«. U heeft daarmee gekozen voor een modern en betrouwbaar systeem.

Werking

De »travelTim« is een elektronische klok met een digitale tijdweergave. U wordt gewekt met een akoestisch signaal of een trilling of een knipperlamp.

Belangrijkste functies

	Stop Alarm en Display Lighting
	Alarm over knipperlamp, hoorbaar alarm en trilalarm
	Trilalarm alleen
	Alarm over knipperlamp en hoorbaar alarm
	Alarm uitschakelen
	Alarm instellen
	Tijd instellen
	Blokkeringspositie
Zzz	Snooze-functie
12/24 h	Klok overschakelen tussen een 12-uursnotatie en een 24-uursnotatie

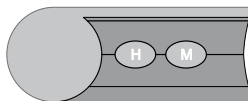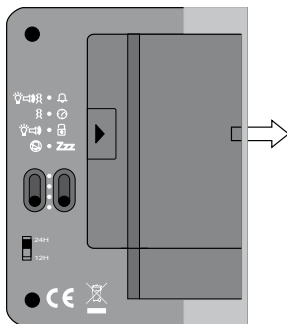

Ingebruikname

1. Batterij aanbrengen

De »travelTim« wordt gevoed met 1x microbatterij AAA (Scherm) 2x mignon-batterij AA (Trilling). Om het te openen, schuift u het batterijvakdeksel met de duim naar pijl rond van het apparaat (zie afbeelding). Leg de 3 batterij in de uitsparing en sluit het apparaat.

2. Tijd instellen





- Schuif de instellingsknop op .
-  /  (Uren/minuten) en druk tot de huidige tijd is ingesteld.
- Schuif vervolgens de knop  naar de positie LOCK (Vergrendelen).
- Met de instellingsknop op de achterkant van het apparaat kunt u de tijdsnotatie van de klok overschakelen tussen een 12-uursnotatie en een 24-uursnotatie.

Opmerking: Kunt u de tijdsnotatie van de klok »travelTim« op aan een 12-uursnotatie aanpassen (Uit 12 klok Noon) „PM“ verschijnt op de display.

3. Wake tijd instellen

- Schuif de instellingsknop op .
-  (Uren/minuten) en druk tot de gewenste alarmtijd is ingesteld.
- Schuif vervolgens de knop  naar de positie LOCK (Vergrendelen).

4. Alarm inschakelen

- Kies Alarm: Schuif de instellingsknop voor alarm over knipperlamp, hoorbaar alarm en trilalarm op , voor trilalarm op  en voor alarm over knipperlamp en hoorbaar alarm op .
- Wanneer het alarm afgaat, schuif de instellingsknop op  om het te stoppen. Als niet moeten hij automatisch na 24 uur herhaald zullen.

5. Alarm inschakelen met snooze-functie

- Kies Alarm.
- Schuif de instellingsknop naar de positie **Zzz**. **Zzz** verschijnt op de display.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de knop  en het alarm wordt elke 8 minuten herhaald. Dus de snooze-functie correct werken moet worden ingedrukt binnen 4 minuten de "Snooze"-toets. **Zzz** niet herhalen als het alarm is meer dan vier minuten terug.
- Wanneer het snooze-alarm afgaat, schuif de instellingsknop  om het te stoppen.

Opmerking:

Het kunnen aangesloten worden accessoires op de 3,5 mm jackaansluiting van de »travelTim« bij voorbeeld vibratiekussen of module.

Opmerking: Het apparaat is **niet** beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat. Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval op het apparaat worden geplaatst. Let erop dat de batterijen niet blootgesteld worden aan sterke warmtebronnen, zoals zonnestraling, brand o.i.d.

Technische gegevens

Afmetingen:	95x70x30mm (HxBxT) met de basis ingeklapt
Gewicht:	130g incl. batterijen
Voedingsconnector:	1 x 1,5 V microbatterij (AAA – type LR03) en 2 x 1,5 V mignon-batterijen (AA - type LR6) voor de vibratiemoter
Kleur:	Zwart/ groen
Duur van het alarm:	4 min.



Dit product is in overeenstemming met de normen van de Europese Unie. EG-conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar bij www.humantechnik.com/service.

Technische wijzigingen voorbehouden.